

COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette

ORIENTAÇÕES:

- Se o saco dessecante não estiver presente na embalagem, **NÃO** use o teste.
- Abrir o frasco da solução tampão pela tampa **AZUL** (**não** abrir pela tampa branca).
- Tempo de leitura do teste: entre 15 e 20 minutos.
- Utilizar **somente** a pipeta que vem dentro da caixa desse teste, pois apesar de parecida com as outras, essa é de **20 microlitros** (e não de 10 microlitros como as outras).
- Após retirar o cassete da embalagem, use-o imediatamente.
- Lotes diferentes de componentes do produto não podem ser misturados.
- **QUALQUER TONALIDADE NA LINHA T (IgG e/ou IgM) DEVERÁ SER CONSIDERADO REAGENTE.**

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Adicione **20** microlitros de sangue total no poço **S** (medida da pipeta capilar que vem dentro da caixa).
2. Após a amostra ter permeado completamente, adicione **2** gotas da solução tampão no poço **B**.
3. Anotar horário; e fazer a **leitura do teste entre 15 a 20 minutos**.

